



採取～郵送までのご案内


PCR検査 唾液採取用キット セット内容

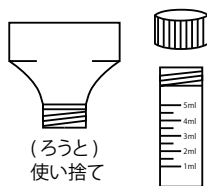


A 唾液保存容器セット

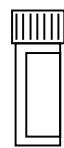

B 保存液

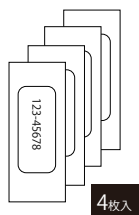


C ナンバリングシール

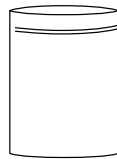

D 密封袋



E お申し込み用紙

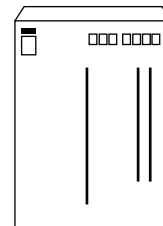



F 返信用封筒

注意事項

採取前30分程度は、飲食や歯磨き、うがい薬を使用したうがいはしないでください。また、採取時はなるべく清潔な環境で手を洗い、水で軽く口をゆすいでから採取してください。

1


しっかり
取り付ける

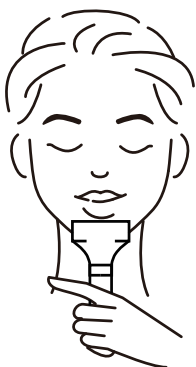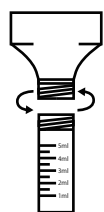

採取時に水で軽く口をゆすいでください。**A**の唾液保存容器に付属の「ろうと」をしっかり取り付け、唾液を採取してください。

たんが混じるとよりよい結果が出ますので、喉元をマッサージして唾液を採取してください。

2

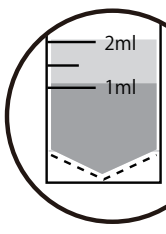

唾液を採取容器の「1～2ml」の目盛りくらいまで入れてください。泡などなるべく入らないよう、お気をつけください。

※正しい検査のために唾液の量にご注意ください。

3



ろうとは
外す

保存液は
全て入れる

しっかりと
フタを閉める

ギュ!

「ろうと」を外し、**B**の保存液を**A**の唾液保存容器に全て入れて、フタをしっかりとねじ込んで締めてください。

※フタが締まっていないと検査が出来ない場合がございます。

※「ろうと」はプラごみとして捨ててください。


4

123-45678

123-45678

1枚: 申込書へ

1枚: 唾液保存容器へ

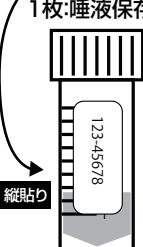


縦貼り



フタをした唾液保存容器へ**C**のナンバリングシールを貼り付け、**E**の申し込み用紙へもナンバリングシールを貼ります。

※ふたに被らないように容器本体に貼ってください。

5

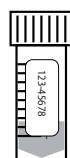

しっかりと
閉める

唾液保存容器を密封袋へ入れます。密封袋がしっかり閉じているか確認してください。

※密封されていない場合、正しい測定が出来ない場合がございます。

6



唾液保存容器



申込書

123-45678

管理番号シール

裏面へ差し出し人
情報を記載ください

Eのお申し込み用紙へ必要事項などを明記いただいてから、**F**の返信用封筒へ「唾液保存容器が入った密封袋」と「お申し込み用紙」、「ナンバリングシール」を入れて、封筒を閉じてください。

封筒の裏面には差出人のお名前と住所をご記入ください。

ナンバリングシールは1枚はお客様保存用です。お問い合わせの際などに必要になる場合などがございますので、大切に保管してください。